

Labor Potsdam der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH | Charlottenstraße 72 | 14467 Potsdam

An alle Praxen und Einsender

Labor Potsdam der
Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Institut für Laboratoriumsmedizin

Labormedizin | Mikrobiologie

Nancy Schuster
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/QMB

Tel: 0331.241 -37071

Fax: 0331.241 -37000

E-Mail:

nancy.schuster@laborpotsdam.de

www.laborpotsdam.de

Potsdam, den 04.02.2026

Betreff: Start der neuen Automation – gemeinsam erfolgreich!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 09.02.2026 ist unsere neue Labor-Automationsstrecke planmäßig in Betrieb. Sie verbindet die Probenerfassung, -verteilung, -vorbereitung, -analytik und -archivierung zu einem durchgängigen automatisierten Prozess.

Bitte beachten Sie:

Die neue Probenannahme wird erst im März eröffnet. Die bisherigen Probenannahmeplätze bleiben daher bis auf Weiteres bestehen.

Mit der neuen Automation wird unter anderem der Serum-Index eingeführt. Dabei handelt es sich um einen automatisch bestimmten Qualitätsparameter, der Hinweise auf Hämolyse, Lipämie und Ikterus liefert. Diese Einflussgrößen können Messergebnisse beeinflussen und werden daher künftig routinemäßig überprüft.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und manuellen Mehraufwand zu vermeiden, ist eine korrekte Präanalytik besonders wichtig. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Bitte achten Sie insbesondere auf folgende Punkte:

Füllmenge

- Proben bis zur Markierung füllen
- Unterfüllte Röhrchen können nicht zuverlässig verarbeitet werden

Etikettierung

- Etiketten gerade und korrekt aufkleben
- Keine Rund-, Schräg- oder Überklebungen
- Röhrcheninhalt und Füllstand müssen sichtbar bleiben

Probenzustand

- Röhrchen sauber und unbeschädigt
- korrekt verschlossen

Die wichtigsten präanalytischen Punkte (z. B. Füllmenge, Etikettierung) haben wir übersichtlich in einem Dokument zusammengefasst.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserem Präanalytik-Handbuch auf unserer [Homepage](#).

Labor Potsdam der Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

**Klinikum
Ernst von Bergmann gGmbH**
Charlottenstraße 72
D - 14467 Potsdam

Geschäftsführung:
Tomislav Gmajnic
USt. DE 226001047

Sitz der Gesellschaft:
Landeshauptstadt Potsdam
Amtsgericht Potsdam
HRB-Nr. 16279 P

Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN DE13 1605 0000 3503 3102 30
BIC WELADED1PMB

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei der Einführung der neuen Automati-
on.


Freundliche Grüße
Ihr Labor

S-Monovette® wichtige Informationen zur Handhabung


Hinweis: Sorgfältig über Kopf schwenken



Barcode-Etikettierung

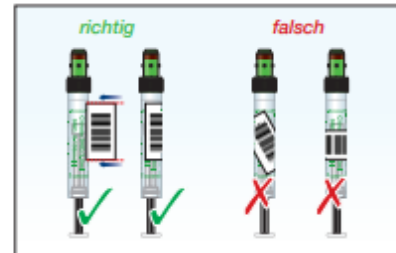

Hinweis zur Lagerung

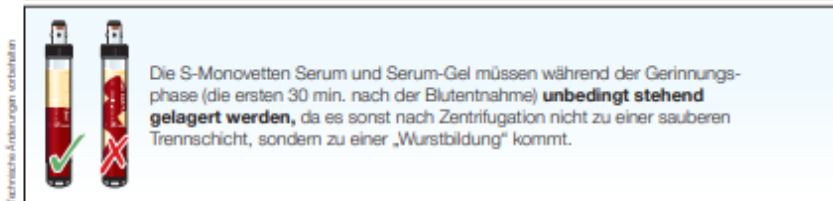


www.sarstedt.com · info@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG · Postfach 12 20 · 51582 Nümbrecht · Telefon +49 2293 305 0 · Telefax +49 2293 305 3450 · Kundenservice Deutschland Telefon 0800 0 83 305 0


Blutentnahme mit der S-Monovette®

Aspirationstechnik – Die schonende Blutentnahme

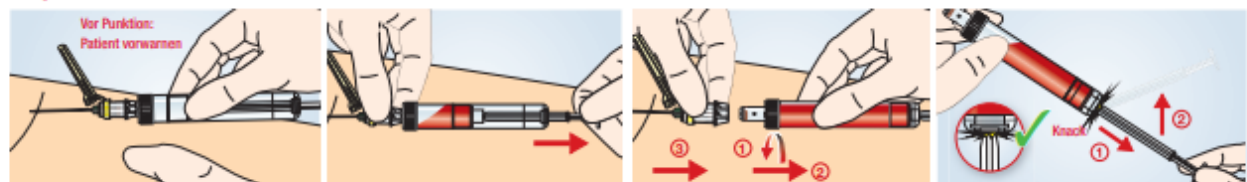

Vakuumentech³ – Blutentnahme mit frischem Vakuum

Prinzipiell empfiehlt SARSTEDT die erste S-Monovette mit der Aspirations-technik abzuschleimen, um so die Blutentnahme schonend zu beginnen.

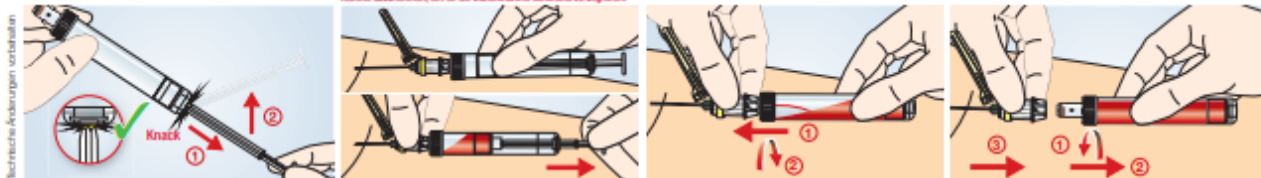

www.sarstedt.com · info@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG · Postfach 12 20 · 51582 Nümbrecht · Telefon +49 2293 305 0 · Telefax +49 2293 305 3450 · Kundenservice Deutschland Telefon 0800 0 83 305 0

| | | |
|---|---|---------------|
| erstellt: Nancy Schuster 27.01.2026 | veröffentlicht: Nancy Schuster 27.01.2026 10:23 | Seite 1 von 1 |
|---|---|---------------|